

Супозиторії вагінальні

# Cytovag® (Цитоваг®)

## Інструкція із застосування медичного виробу

**Склад:** 1 вагінальний супозиторій містить:

гіалуронової кислоти з низькою молекулярною вагою 100-300 кДа (kDa) у вигляді гіалуронату натрію – 2,5 мг (mg), гіалуронової кислоти з високою молекулярною вагою  $\geq$  1,8 кДа (kDa) у вигляді гіалуронату натрію – 2,5 мг (mg), токоферолу ацетату – 5 мг (mg), євгенолу у вигляді ефірної олії гвоздики (містить близько 90% євгенолу) – 5 мг (mg), 18-бета-гліциретинової кислоти – 1 мг (mg), основа: супоцир (C10-18 тригліцериди) – до 2000 мг (mg).

**Супозиторії вагінальні Cytovag® (Цитоваг®)** виявляють зволожувальну, захисну та пом'якшувальну дію, надають полегшення при свербінні, подразненні, печінні та диспареунії, зумовлених зниженою або відсутньою вагінальною секрецією. 2 типи гіалуронової кислоти (у вигляді гіалуронату натрію) з різною молекулярною вагою у складі Cytovag® (Цитоваг®) мають захисний, зволожувальний та відновлювальний вплив на слизову оболонку піхви. Інші інгредієнти природного походження (токоферолу ацетат, євгенол, 18-бета-гліциретинова кислота) справляють антиоксидантну та заспокійливу дію на слизову піхви.

При вагінальному введенні у піхву напівсинтетичні гліцериди (супоцир), що являють основу супозиторію, під дією температури тіла поступово розчиняються, а активні компоненти з високими змащувальними властивостями (2 види гіалуронової кислоти з різною молекулярною вагою, токоферолу ацетат, євгенол та 18-бета-гліциретинова кислота) утворюють захисну та зволожувальну плівку на поверхні слизової оболонки піхви.

**Показання до застосування:** Супозиторії вагінальні Cytovag® (Цитоваг®) використовуються для підсилення відновлювальних процесів при атрофічних та дистрофічних змінах вагінальної слизової оболонки, при реепітелізації шийки матки та для попередження гнійно-запальних процесів в гінекології:

- для лікування та профілактики атрофії слизової оболонки піхви, вагінітів та вагінозів;
- перед та після інвазивних процедур, гінекологічних операцій;
- для попередження вагінальної сухості, зумовленої дефіцитом естрогенів, у період клімаксу, менопаузи та післяпологовий період;
- під час хіміотерапії та променевої терапії;
- у разі вагінальної сухості, зумовленої цукровим діабетом та/або стресом.

**Спосіб застосування та дозування:** Ретельно вимийте руки, дістаньте з блистера один супозиторій, потягнувши у різні боки за два вільних краї блистера над загостреним кінцем супозиторію. Введіть супозиторій глибоко у піхву загостреним кінцем вперед. Введення краще виконувати в позиції лежачи, перед сном.

З метою лікування використовуйте по одному супозиторію один раз

на добу протягом 10 (десяти) днів або як призначив лікар.  
З метою профілактики використовуйте по одному супозиторію один раз на 3 (три) дні впродовж одного місяця.

### **Протипоказання:**

Не застосовуйте Супозиторії вагінальні Cytovag® (Цитоваг®):

- при підвищеній чутливості до складових компонентів;
- на пошкоджених слизових оболонках;
- одночасно з іншими вагінальними засобами.

### **Застереження:**

Уникайте контакту з очима; у разі контакту промийте великою кількістю води. Не ковтайте.

Не перевищуйте рекомендоване дозування.

У разі підвищеної чутливості припиніть використання та проконсультуйтеся з лікарем.

У разі виникнення будь-яких сумнівів зверніться до лікаря.

Не використовуйте після закінчення терміну придатності, вказаного на упаковці.

Не використовуйте, якщо блистер відкрито або пошкоджено.

**Побічна дія:** При підвищеній чутливості до одного чи декількох з компонентів можливе виникнення алергічної реакції.

**Упаковка:** вагінальні супозиторії по 2 г (g) у блистері №5, по 2 блистера у картонній коробці разом із інструкцією із застосування.



### **Умови зберігання:**

Зберігайте при температурі не вище 25°C.



Зберігайте у захищеному від потрапляння прямих сонячних променів, сухому, прохолодному та недоступному для дітей місці.

**Строк придатності:** 3 роки.



**Виробник:** EKUBERG PHARMA srl., Via Tito Schipa, 6 – 73020, Carpignano Salentino (LE), Italy  
ЕКУБЕРГ ФАРМА срл., Віа Тіто Шіпа, 6 – 73020, Карпіньяно-Салентіно (Лечче), Італія.



### **Уповноважений представник виробника в Україні:**

ТОВ «ЗДРАВО», вул. Автозаводська, 54/19, літера А,  
м. Київ, 04114, Україна, тел.: +38 044 503 78 68,  
e-mail: info@zdravo.in.ua, [www.cytovag.com.ua](http://www.cytovag.com.ua)

**Дата останнього перегляду тексту:** 05.05.2021.



Повторно використовувати ЗАБОРОНЕНО.



**Використати до** – зазначено на упаковці.



**Номер партії** – зазначено на упаковці.

